

サポートツールの使い方

来館されるお客様の状況に応じ、対話や鑑賞をスムーズに補助するためのツールです。

※活動プログラムによって使用するツールは異なります。

東京都写真美術館
2026.Sep


筆談ボード

「ERASE」に合わせて消去できる

消去ボタン

裏側にペンが2本

2画面それぞれに使えます

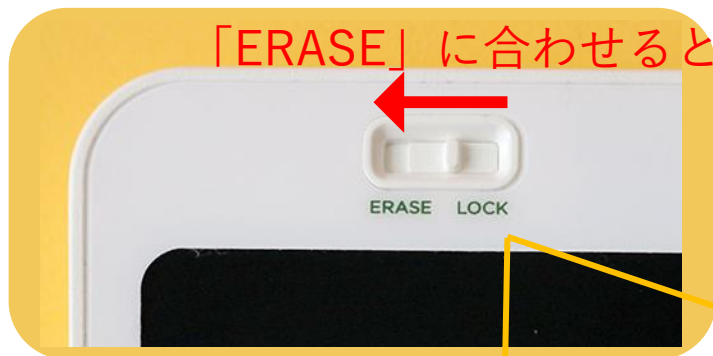

iPad



カメラ（撮る）



写真（保存）



フォルダ

図録等の資料はここ




YY文字起こし



UDトーク



Uni-Voice

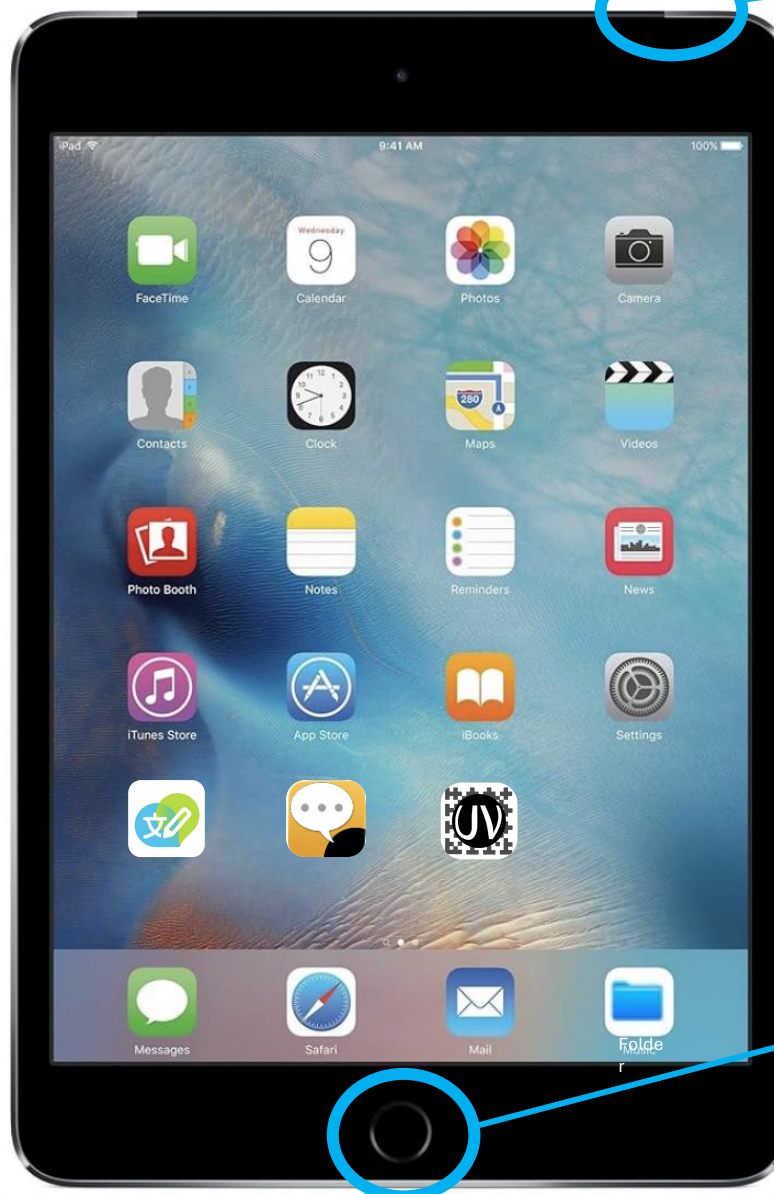

電源ボタン

ホームボタン

最初の画面に
戻したい時

ルーペ



2倍



4倍

作品をライトで照らすのは禁止




7倍

ロジャー ネックループ



1. ロジャー ネックループの一番上のソケットに、ループの片方を取り付けます。
2. ループを首の周りにはけ、ループのもう片方をもう一方のソケットに取り付けます。

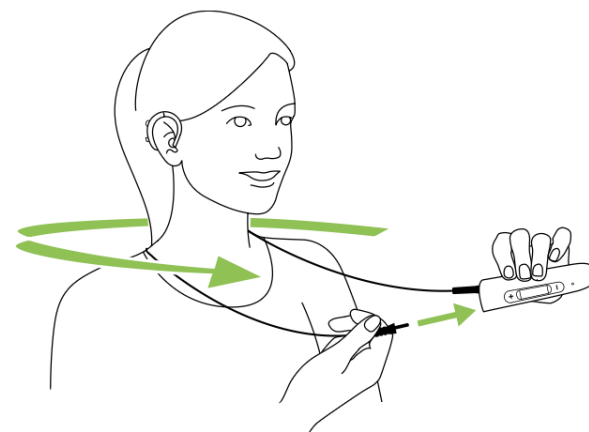


聞き手

補聴器とロジャー
ネックループを使用


話し手

ロジャー マイクロホン
を使用

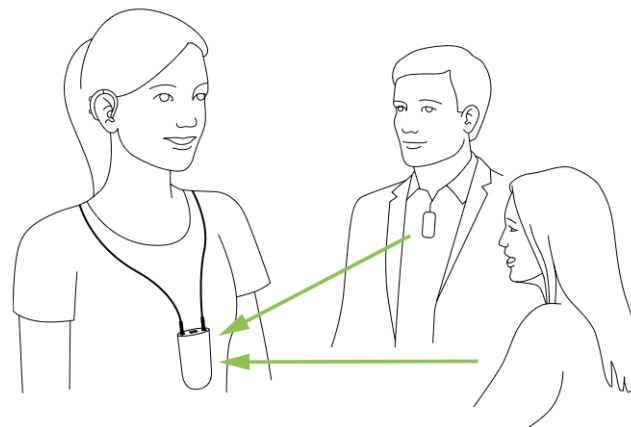


3.3 ロジャー マイクロホンへの接続

1. ロジャー マイクロホンの電源をオンにします。

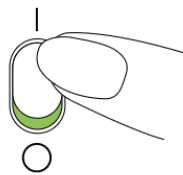


2. 補聴器/サウンドプロセッサをT-コイルプログラムに変更します。

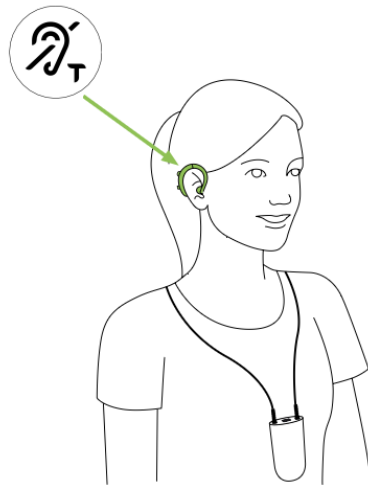

① T-コイルプログラムを補聴器/サウンドプロセッサで有効にするため、聴覚専門家に問い合わせる必要が生じる場合があります。

3. ロジャー ネックループをロジャー マイクロホンから 10 cm 以内のところで持ちます。

4. ロジャー マイクロホンの Connect(接続)  ボタンを短く押します。ロジャー マイクロホンの取扱説明書を参照してください。接続に成功するとディスプレイに表示されます。

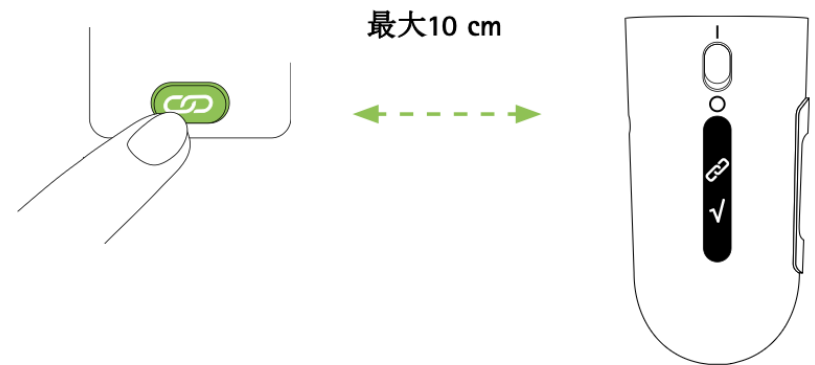

① 接続は、ロジャー ネックループを初めて使用するときのみ必要です。ロジャー ネックループを再起動した後も、ロジャー ネックループはマイクロホンと接続した状態になります。

センサーキット

説明「必要なものだけ借りることができます」

「名前と連絡先の記入が必要です。スタッフが代わりに書くこともできます」


「使い終わったら1F総合受付に返しに来てください」

説明「感覚過敏などにより、音の刺激に不安がある方向けのイヤーマフと呼ばれるものです。ヘッドホンではありません。大きな音を和らげながら、映画や映像の音も楽しむタイプのイヤーマフです。」

説明「近づいてよく見てみたくなったときに使ってください。作品にぶつけないように気をつけてください」

イヤーマフ

虫めがね

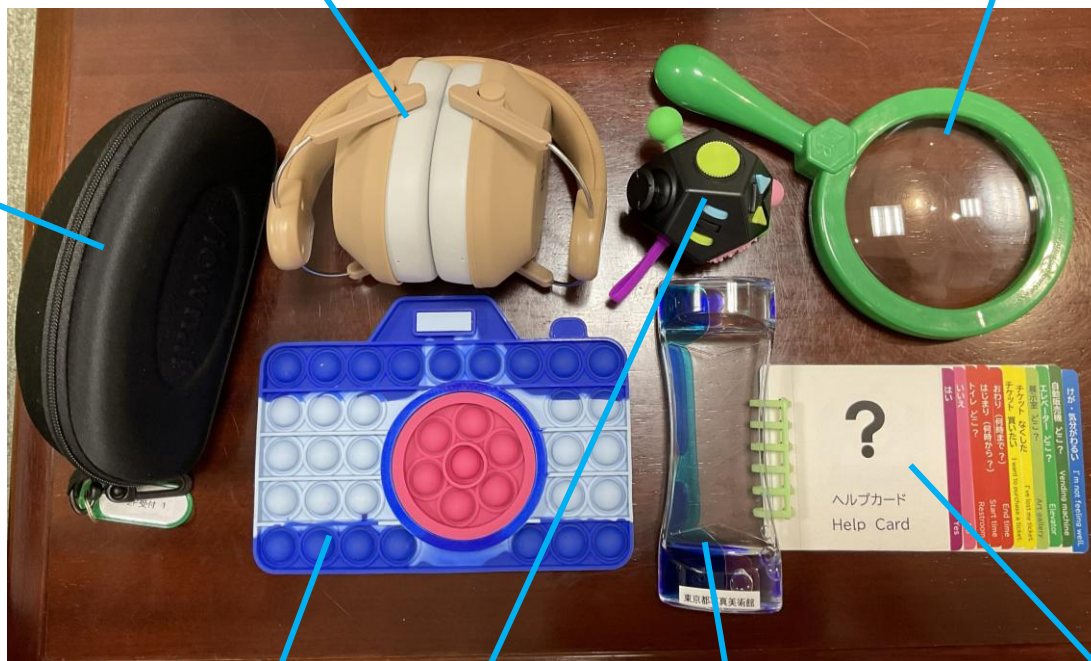

遮光眼鏡

説明「映像作品を見たり、証明の眩しさが気になるときに使えます。色味をなるべく変えずに眩しさだけをカットするメガネです。サングラスではありません。」

フィジェット・トイ

説明「感覚過敏がある方、なにか指先で動かしているのが落ち着く方に。カメラ型のほうはぷちぷち、黒いほうはかちかちします。」

オイルタイマー

説明「気持ちを落ち着けたいときに。砂時計のように、いろいろな色の粒が落ちていくのをゆっくり見てみてください」

ヘルプカード

説明「困ったことがあったときに、カードを指さして、近くのスタッフに教えてください」

Antenna (アンテナ)


アンテナの電源をON(●)にする



シンプルモード

スマートモード

マイク

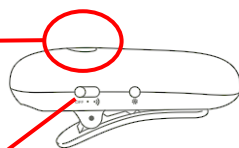


アンテナのマイクを用いて、
音を感じるモード



コントローラーと通信して、
音を感じるモード

ライトのON/OFF ※1

・LEDライトが必要ない場合

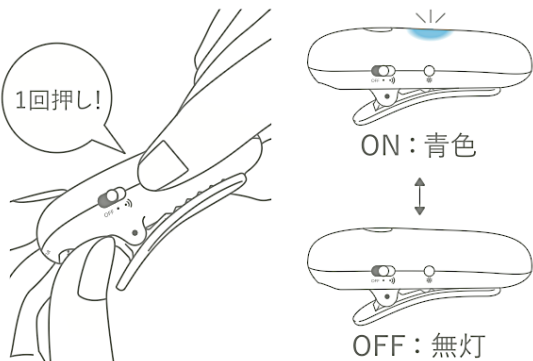

1回押し：ライトのON/OFF切り替え


(利用例)

ライトON：学校などで使う場合

ライトOFF：公共施設などで使う場合

音ズーム機能のOFF/ON ※1

・静かな場所で使用する場合は音ズームをONにしてください

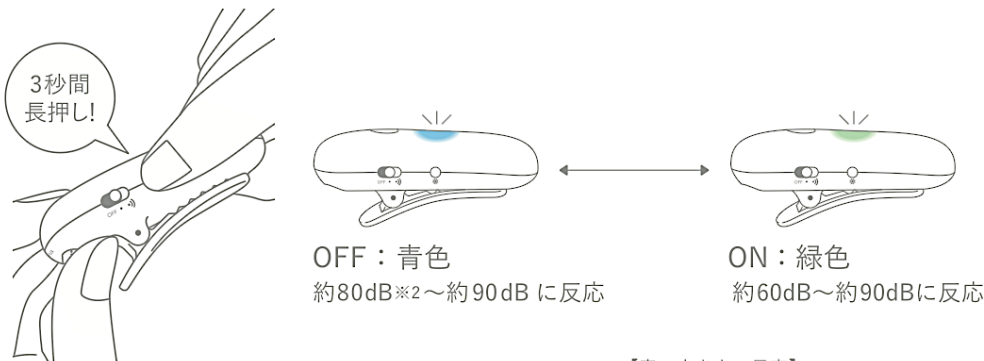

3秒間長押し：音ズーム機能のOFF/ON切り替え

(利用例)

音ズームOFF：体育館など人が集まる場所で使う場合

音ズームON：教室などで使う場合

【音の大きさの目安】

90dB：カラオケ音・犬の鳴き声/人の声(怒鳴り声)

80dB：走行中の電車内・救急車のサイレン/人の声(かなり大きな声)

70dB：高速走行中の自動車内・騒々しい教室の中・セミの鳴き声/人の声(大きな声)

60dB：走行中の自動車内・普通の会話・デパート店内/人の声(普通の声)

※2 dB (デシベル)：音の大きさの単位

※1：ライトと音ズームのON/OFF機能はスマートモードでは使用できません。

トランシーバー

- ・所定の位置に着いたら、マイクで報告する
- ・話しはじめは必ず名前を名乗る

